

Hur används ett munskydd på ett säkert sätt?

För att munskydd ska kunna fungera som ett extra skydd måste det användas på rätt sätt. Det innebär att bäraren måste tänka på flera saker:

- Utför handdesinfektion före munskyddet tas på, efter att munskyddet tagits av eller då munskyddet hanterats på annat sätt
- Sätt på munskyddet korrekt så att det täcker näsa och mun. Forma bygeln över näsan.
- Undvik att röra vid munskyddet när du har det på dig
- Munskyddet är engångs och ska inte återanvändas. Kasta munskyddet direkt efter användning. Förvara inte munskyddet i fickan eller där det kan skadas eller förorenas.
- Ta av munskyddet om det blivit fuktigt eller nedsmutsat

